



Bestellnummer

5810321

Beschreibung

Unsere WESTMED® Universalschienen eignen sich zur Schienung und Ruhigstellung von Extremitäten. Gerade im Notfall ist die leicht anzulegende Schiene ideal.

Die FlexSplint Universalschienen bestehen aus einem Kunststoffschäum (IPXE) und Aluminiumgemisch und lassen sich ganz einfach mit einer Schere auf die gewünscht Länge kürzen. Modelliert können sie so an nahezu jeden Einsatzzweck angepasst werden. Das flüssigkeitsabweisende Material ermöglicht eine einfache Desinfektion und das wiederverwenden nach einem Einsatz.

Technische Informationen	
Referenznummer	AZ-ST100
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Die FlexSplint Universalschienen dienen ausschließlich zur Ruhigstellung und Schienung von Frakturen und Sportverletzungen wie z. B. Bänderdehnungen.
Maße	100 cm x 11 cm
Gewicht	160 g
Material	Ummantelung: Polyethylen-Schaum (IXPE) Kern: Aluminium
Lagerungs- und Transportbedingungen	-25 °C bis 65 °C
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum
Verpackungseinheit	1 Stück pro Packung 50 Packungen pro Karton 40 Kartons pro Palette



Reinigung und Desinfektion	<p>Die FlexSplint Universalschienen können wiederverwendet werden. Dazu muss die Schiene nach jeder Verwendung nach den entsprechenden örtlich geltenden hygienischen Richtlinien gereinigt und desinfiziert werden.</p> <p>Mit einem milden Reiniger oder einem Flächendesinfektionsmittel kann FlexSplint gereinigt werden. Bitte beachten Sie dazu die Herstellerhinweise zum Reiniger oder Desinfektionsmittel.</p> <p>Nach erfolgter Reinigung bzw. Desinfektion muss die Schiene mit klarem Wasser abgespült werden, um den übrigen Reiniger oder das übrige Desinfektionsmittel zu entfernen. Lassen Sie die Schiene anschließend trocknen.</p>
----------------------------	--

Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Diese Gebrauchsanweisung ersetzt keine ausführliche Einweisung bzw. Schulung des Anwenders.• Die FlexSplint Universalschienen dürfen nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Verwendungszweck eingesetzt werden.• Bei einer längeren Anwendung (> 1 Stunde) sollte die Schiene patientenseitig gepolstert werden.• Beim Zuschneiden der Universalschiene können scharfe Kanten entstehen, die abgedeckt oder gefaltet werden müssen.• Offene Wunden müssen vor dem Einsatz der Schiene mit sterilen Verbänden abgedeckt werden.• Die Schiene ist nicht für den Einsatz bei Frakturen der Wirbelsäule und des Beckens geeignet.• Beim Fixieren der Schiene ist unbedingt darauf zu achten, dass die Blutversorgung nicht unterbrochen wird. Zur Kontrolle der Durchblutung müssen die Finger- oder Zehenspitzen freiliegen.
---------------------	--

Regulatorische Informationen

Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I Gemäß Anhang VIII, Verordnung (EU) 2017/745
-----------------	--



WESTMED

DATENBLATT WESTMED® FlexSplint Universalschiene

Verpackungssymbole	
	Die CE-Kennzeichnung steht für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet. Sie symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, welche die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt.
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Gebrauchsanweisung beachten
	Bevollmächtigter Europa
	Referenznummer/Artikelnummer
	Temperaturgrenzwert
	Medizinprodukt
	Vorsicht/Achtung
	Vertreiber
	Importeur



Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd,
500 meters, Nan Sucun, Anping County
Hengshui City, Hebei Province, 053600, P. R. China



MedNet EC-REP GmbH
Borkstr. 10, 48163 Münster, Germany