

# Unsere Komplettlösung für die Notfall-Intubation

 **INTERSURGICAL**  
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS  
**i-gel<sup>®</sup> O<sub>2</sub>**

**Resus Pack**

Konzentriert auf das Wesentliche

 **INTERSURGICAL**  
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS  
Qualität, Innovation und Vielfalt



[www.i-gel.com](http://www.i-gel.com)



INTERSURGICAL  
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

# i-gel<sup>O<sub>2</sub></sup>

## Resus Pack



Besonders in der Notfallmedizin ist Equipment erforderlich, das sich leicht, schnell und verlässlich anwenden lässt. Das i-gel O<sub>2</sub> Resus Pack enthält alles, um die i-gel O<sub>2</sub> schnell und effizient vorzubereiten, einzuführen und zu sichern: eine i-gel O<sub>2</sub> supraglottische Atemhilfe, ein Tütchen Gleitmittel, ein Airway-Fixierband und einen Absaugkatheter.

Die i-gel O<sub>2</sub> besitzt einen supplementären Sauerstoff-Port und einen integrierten Hakenring, an dem sich das Airway-Fixierband befestigen lässt.

Die i-gel O<sub>2</sub> wurde entworfen, um die Beatmung im Rahmen der Standard-Reanimation zu erleichtern, wie in den Richtlinien des European Resuscitation Council (ERC) und der American Heart Association (AHA) beschrieben. Da die i-gel O<sub>2</sub> einen supplementären Sauerstoff-Port besitzt, kann sie auch im Rahmen der passiven Sauerstoffzufuhr und des passiven Airway Managements (PAM™) eingesetzt werden, unter Berücksichtigung entsprechender Standards der kardiozerebralen Reanimation (CCR).



### Das i-gel O<sub>2</sub> Resus Pack ist in 3 Größen für Erwachsene erhältlich und umfasst:

- i-gel O<sub>2</sub> supraglottische Atemhilfe
- Tütchen mit Gleitmittel – zur schnellen und einfachen Lubrikation der i-gel O<sub>2</sub> vor der Einführung
- Airway-Fixierband – um die i-gel O<sub>2</sub> zu sichern
- 12CH Absaugkatheter – zur Einführung durch den gastrischen Kanal, um Flüssigkeiten aus dem Magen zu entfernen.

# Die neue i-gel O<sub>2</sub>



## Hakenring

Zusammen mit dem Airway-Fixierband hält er die i-gel in der richtigen Position

## Gastrischer Absaugkanal

Erhöhte Patientensicherheit durch Kontrolle des Rückflusses

## Nicht-aufblasbare Manschette

Ermöglicht ein reibungsloses Einführen und vermeidet Kompressionstraumata



## Supplementärer Sauerstoff-Port

Zur passiven Sauerstoffzufuhr im Rahmen der kardiozerebralen Reanimation (CCR)

## Integrierter Beißkeil

Vermindert das Risiko einer Atemwegsokklusion

## Vestibulum Oris Stabilisator

Erleichtert die Einführung und vermindert die Gefahr einer möglichen Produkt-Rotation.

## Epiglottisblocker

Trägt dazu bei, ein Herunterklappen der Epiglottis oder eine Obstruktion der distalen Atemwegsöffnung zu vermeiden

## i-gel: Airway-Innovation seit 2007

i-gel ist eine supraglottische Atemhilfe zweiter Generation, die 2007 von Intersurgical eingeführt wurde. Als erste große Innovation seit der Larynxmaske hat die i-gel dem Airway Management neue Impulse gegeben und wird heute weltweit in Anästhesie und Notfallmedizin eingesetzt.



### Die nicht-aufblasbare Manschette

Die Bezeichnung i-gel leitet sich von dem gelartig weichen Material des Produkts ab. Erst dieses innovative thermoplastische Elastomer ermöglichte die Entwicklung einer nicht-aufblasbaren Manschette. Da die i-gel O<sub>2</sub> perfekt auf die Anatomie der laryngealen Strukturen abgestimmt ist, ermöglicht sie eine optimale Abdichtung ohne Inflation der Manschette.


### Einführung

Die Anwendung der i-gel O<sub>2</sub> ist unglaublich einfach, instinktiv sicher und dauert in der Regel weniger als 5 Sekunden. Das Einführen von Fingern oder Daumen in den Mund des Patienten ist dabei überflüssig.

### Fixierung

Das i-gel O<sub>2</sub> Resus Set enthält ein speziell entworfenes Airway-Fixierband, mit dem die i-gel O<sub>2</sub> gesichert wird. Die Fixierung ist einfach: Das Fixierband wird unter den Nacken des Patienten gelegt und am Hakenring der i-gel O<sub>2</sub> befestigt. Die i-gel O<sub>2</sub> eignet sich besonders, wenn eine Fixierung mit Klebeband schlecht möglich ist, zum Beispiel bei Patienten mit Gesichtsbehaarung.







**INTERSURGICAL**  
 COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS  
**i-gel<sup>®</sup> O<sub>2</sub>**  
**Resus Pack**

## Bestellinformation

Das i-gel O<sub>2</sub> Resus Pack enthält neben der i-gel O<sub>2</sub> einen herausnehmbaren Einsatz, in dem sich ein Tütchen Gleitmittel, ein Airway-Fixierband und ein Absaugkatheter befinden. Die speziell entworfene Verpackung ist transparent, steril, fest und garantiert so optimalen Schutz während Transport und Lagerung. Die i-gel O<sub>2</sub> hat einen farbcodierten Hakenring, der eine schnelle Bestimmung der Größe erleichtert. Das i-gel O<sub>2</sub> Resus Pack ist in drei Größen für Erwachsene erhältlich:



Nummer	Produkt	VE
 <b>8705000</b>	i-gel O <sub>2</sub> Resus Pack – enthält die i-gel O <sub>2</sub> Größe 5, ein Tütchen Gleitmittel, Airway-Fixierband und einen Absaugkatheter CH 12. Für Erwachsene 90+kg	<b>6</b>
 <b>8704000</b>	i-gel O <sub>2</sub> Resus Pack – enthält die i-gel O <sub>2</sub> Größe 4, ein Tütchen Gleitmittel, Airway-Fixierband und einen Absaugkatheter CH 12. Für Erwachsene 50-90kg	<b>6</b>
 <b>8703000</b>	i-gel O <sub>2</sub> Resus Pack – enthält die i-gel O <sub>2</sub> Größe 3, ein Tütchen Gleitmittel, Airway-Fixierband und einen Absaugkatheter CH 12. Für Erwachsene 30-60kg	<b>6</b>



Interaktiv



Mehr Informationen unter [www.i-gel.com](http://www.i-gel.com)



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin  
 T: 02241-311063 F: 02241-313143 anfrage@intersurgical.de | www.intersurgical.de

