

**SAM**  
MEDICAL

# SAM<sup>®</sup> XT

Extremity Tourniquet

**KLICKEN.  
DREHEN.  
FIXIEREN.**

## ZUVERLÄSSIGER LEBENSRETTETTER

Dank seines innovativen Designs lässt sich das SAM XT schnell anlegen und ermöglicht so leichteres, schnelleres Anlernen und intuitive Nutzung.



## VERWENDETE TECHNOLOGIE

### TRUFORCE™ SCHNALLE

Ein unzureichend gestraffter Gurt ist der Hauptgrund für die Fehlanlage von Tourniquets. Dank der TRUFORCE™ Verschluss-technologie mit dem integrierten innovativen Kraftkontrollsystem rasten Sperrzacken automatisch ein, wodurch eine unzureichende Straffung des Gurts fast komplett eliminiert wird.



## EIN DESIGN, DAS LEBEN RETET

### 1 ZEITBAND

Auf dem witterungsbeständigen Klettband lässt sich die Applikationszeit leicht notieren.

### 2 C-HOOKS FÜR KNEBEL

Sichern den Knebel mit einem intuitiven Winkeldesign, wodurch er sich leichter und effizienter fixieren lässt.

### 3 TRUFLEX™ PLATTE

Die widerstandsfähige Nylonkonstruktion verteilt die Kraft gezielt auf Druck und erzeugt maximale Stärke und Flexibilität. Die Platte lässt sich so ohne zu Brechen um kleinere Extremitäten biegen.

### 4 TRUFORCE™ SCHNALLE

Die innovative, automatische Verschluss-technologie lässt die Sperrzacken einrasten und eliminiert so die beim Gebrauch anderer Tourniquets typische unzureichende Straffung.

### 5 KNEBEL AUS HIGH-IMPACT-POLYMER


Im Spritzgussverfahren aus starkem, leichtem, hitze- und UV-beständigem High-Impact-Polymer hergestellt.

### 6 PRÄZISIONSGURT

Tourniquets, die sich nur mit einem Klettverschluss sichern lassen, können bei Nässe oder Schmutz versagen. Der allwettertaugliche Präzisionsgurt besteht aus einlagigem Nylogewebe, ist mit zwei parallelen Lochreihen versehen und lässt sich mit der TRUFORCE™ Schnalle immer wieder effizient primär sichern. Mit dem Klettband wird der Rest des Gurtes sekundär fixiert und bietet so zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

### 7 PRÄZISIONSLASCHE

Intuitives Design ermöglicht schnelleres und leichteres Anlegen des Tourniquets und das Material ist bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar.

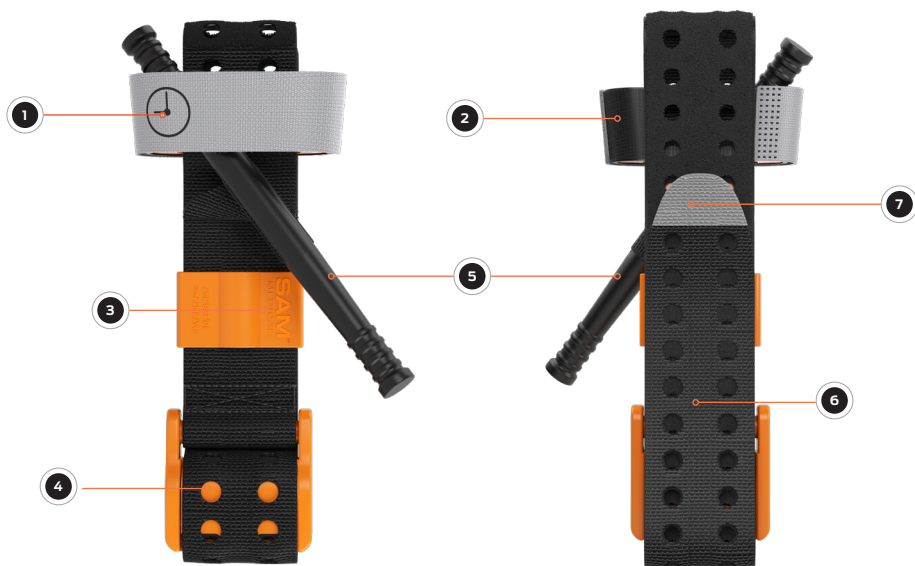

## MODELLE



## PRODUKTDATEN

### GRÖSSE UND GEWICHT IM VERPACKTEN ZUSTAND\*

Länge: 6,3 cm (2,5 Zoll)  
Breite: 3,8 cm (1,5 Zoll)  
Höhe: 18,4 cm (7,25 Zoll)  
Gewicht: 96,4 g (3,4 oz.)

### LEISTUNGSDATEN

TRUFORCE™ Schnallentechnologie mit automatischem Sperrmechanismus zum Eingreifen in Gurtlöcher im Umfangsbereich von: 14,6 bis 82,6 cm (5,75 bis 32,5 Zoll)

### ERHÄLTICHE MODELLE

Taktisch Schwarz (XT700-BK-EN)  
HI-VIZ Orange (XT700-OR-EN)  
HI-VIZ Blau (XT700-BL-EN)

### GLOBALER VERTRIEB

+1 503.639.5474  
sammedical.com



Emergo Europe, Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, Niederlande



SAM Medical Products®  
12200 SW Tualatin Rd., Ste 200  
Tualatin, OR 97062 USA

US-Patent-Nr. 10,258,347 | 10,363,046

\* Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Fertigungsprozess.  
SAM® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke.  
© 2024 SAM Medical Products. Alle Rechte vorbehalten.

SXT700-SS-DE-02