



WESTMED

DATENBLATT WESTMED® Standard-Blutdruckmessgerät



Bestellnummer

5810002

Beschreibung

Unser WESTMED® Standard-Blutdruckmessgerät ist nicht nur sehr robust, sondern aufgrund des Preis-/Leistungsverhältnisses eine ideale Alternative zu den sonst hochpreisigen Markengeräten. Die Blutdruckwerte lassen sich dank der schlichten Skala einfach und schnell ablesen.

Das 2-Schlauch Blutdruckmessgerät wird mit einer Klettmanchette für Erwachsene ausgeliefert. Als passendes Zubehör erhalten Sie die WESTMED® Klettmanschetten auch für Säuglinge, Kinder und Erwachsene mit starken Armen.

Technische Informationen	
Referenznummer	HS-201C2
Druckmesser Skala	60 mm
Messbereich	0 - 300 mmHg
Messwertauflösung	2 mmHg
Genauigkeit Druckanzeige	± 3 mmHg (0,5 kPa)
Druckminderungsrate	2-3 Sekunden
Schlauch-System	2-Schlauch-Technik
Sterilisation	Nicht sterilisierbar
Lagerungsbedingungen	-20°C bis 70°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85% (nicht kondensierend)
Transportbedingungen	Licht- und wassergeschützt
Haltbarkeit	10.000 Messungen oder 5 Jahre ab Produktionsdatum
Verpackungseinheit	1 Stück pro Packet 30 Pakete pro Karton 16 Kartons pro Palette



Allgemeine Informationen	
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht verwenden, wenn das Blutdruckmessgerät beschädigt oder verschmutzt ist • Setzen Sie die Manschetten niemals intensiver Sonneneinstrahlung aus • Berühren Sie niemals das Manschettengewebe oder Teile davon mit einem scharfen Gegenstand, da dies zu Schäden führen könnte • Lassen Sie die Manschette vor der Lagerung immer vollständig entlüften • Zerlegen Sie das Manometer unter keinen Umständen
Reinigung und Desinfektion	Entfernen Sie zuerst die Blase und wischen Sie den Klettverschluss, die Blase und die Schläuche mit einem feuchten Tuch ab. Die Manschette kann wie alle anderen Manschetten mit Seife und kaltem Wasser gewaschen werden, muss aber anschließend mit klarem Wasser abgespült und an der Luft getrocknet werden. Wischen Sie das Manometer und den Balg mit einem feuchten Tuch ab. Eine Sterilisation ist nicht erforderlich, da die Teile nicht in direkten Kontakt mit dem Körper des Patienten kommen.







Regulatorische Informationen	
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I(m) Gemäß Anhang VIII, Verordnung (EU) 2017/745

Verpackungssymbole	
MD	Medizinprodukt
REF	Referenznummer/Artikelnummer
EC REP	Bevollmächtigter Europa
CH REP	Bevollmächtigter Schweiz
	Vertreiber
	Importeur



WESTMED

DATENBLATT WESTMED® Standard-Blutdruckmessgerät

	Hersteller
	Produktionsdatum
	Bedienungsanleitung beachten
	Vor Nässe schützen
	Vor Hitze schützen
	Die CE-Kennzeichnung steht für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet. Sie symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, welche die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt.



HONSUN (NANTONG) Co.,
Ltd No. 8 Tongxing Road Economic & Technological
Development Area, 226009 Nantong City, Jiangsu Province, P. R. China



Shanghai International Holdin Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, Hamburg, Germany



MedNet SWISS GmbH
Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland