

ERLEBEN SIE DEN **OXY** EFFEKT

## Incidin® OxyFoam &amp; OxyWipe

NEU!


Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>

Die innovativen Produkte Incidin® OxyFoam & Incidin OxyWipe bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum.

Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände. Die Wirksamkeit von OxyWipe wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

Incidin® OxyFoam & OxyWipe bieten:

- ▲ Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>
- ▲ Praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- ▲ Hohe Anwenderfreundlichkeit
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit

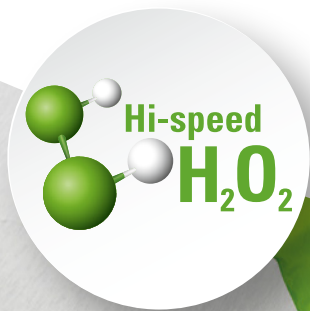

# Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>


**15 SEK<sup>2</sup>** Bakterizid (EN 13727/16615) **15 SEK<sup>2</sup>** Viruzid gegen behüllte Viren **15 MIN<sup>2</sup>** Noroviruzid

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
<b>EFFEKTIV</b>	Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
<b>SICHER<sup>1</sup></b>	Exzellente Materialverträglichkeit - Keine aktiven Rückstände - Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
<b>ANWENDERFREUNDLICH</b>	Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel - Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt


WIRKSAMKEIT	Einwirkzeit OXYFOAM	Einwirkzeit OXYWIPE
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	5 Min.	15 Min.
Fungizid	15 Min.	15 Min.
Tuberkulozid, mykobakterizid	15 Min.	60 Min.
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie 2008		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	15 Sek.	30 Sek.
Rotavirus*	30 Sek.	30 Sek.
Adenovirus*	1 Min.	15 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	30 Sek.	30 Sek.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	15 Sek.	1 Min.
EN 13624 (levurozid)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fungizid)	5 Min.	15 Min.
EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (Adenovirus)	30 Sek.	1 Min.
EN 14476 (Norovirus)	15 Min.	60 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	15 Sek.	5 Min.
EN 16615 (levurozid)	15 Sek.	1 Min.
EN 16615 (fungizid)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)	15 Min.	60 Min.

\* DVV 2008

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR INCIDIN® OXYFOAM



- 1 Aus einem Abstand von ca. 30 cm auf die Oberfläche sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen



- 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

**EUROPEAN HEADQUARTERS:**  
**ECOLAB EUROPE GMBH**  
 Richtistrasse 7  
 8304 Wallisellen  
 Switserland  
 +41(0) 44-877-2001  
 www.ecolab.eu

**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**  
 Ecolab-Allee 1  
 40789 Monheim am Rhein  
 +49(0) 2173-599-1900  
 www.ecolabhealthcare.de



## ANWENDUNGSBEREICH

**Incidin® OxyFoam:**  
 Schaumspray zur Reinigung und Desinfektion medizinischer Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und medizinischem Inventar.



**Incidin® OxyWipe:**  
 Reinigungs- und Desinfektionstücher für medizinische Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und Inventar.



Ⓢ BIOZID N-61595  
 Ⓢ BIOZID N-61592

## GEBRAUCHSANWEISUNG

**Incidin® OxyFoam:** Anwendungsfertige Lösung. Unverdünt auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.

**Incidin® OxyWipe:** Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschließen. Nicht geeignet zur Schlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

## WIRKSTOFF

100 g enthalten:

**Incidin® OxyFoam:** 1,5 g Wasserstoffperoxid

**Incidin® OxyWipe:** 1,0 g Wasserstoffperoxid

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

## VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® OxyFoam	6 x 750 ml	30 821 60 PZN 1115 60 47
Incidin® OxyWipe	6 x 100 Tücher Tuchgröße: 20 x 20 cm	30 823 60 PZN 1115 60 53
Wandhalterung	1 x 6 Stück	10033877

## LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

### Haltbarkeit nach dem Öffnen:

**Incidin® OxyFoam:**

Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

**Incidin® OxyWipe:** 1 Monat

### Referenzen

1. Exzellente Materialverträglichkeit - Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff.
2. Incidin® OxyFoam (EN 13727/EN 16615/EN 14476)

BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

