

Vier farbkodierte Versionen für alle klinischen Bereiche – unverwechselbar!

Unistik® 3 *Comfort*

PZN 3802421

ø 28 G (0,375 mm), Eindringtiefe 1,8 mm
Durchschnittliches Blutvolumen 5 µl – 30 µl

Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:
Alle Kapillarblutuntersuchungen, für die
eine kleinere Blutmenge ausreicht.

Packung mit je 100 Einheiten: AT 1042



Unistik® 3 *Normal*

PZN 3802409

ø 23 G (0,66 mm), Eindringtiefe 1,8 mm,
Durchschnittliches Blutvolumen 30 µl – 75 µl

Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:
Durch höhere Blutmenge besonders geeignet für Bluttrans-
fusionszentren und Blutspendedienste, aber auch für Cholesterin-
bestimmungen und alle anderen Routinebestimmungen.

Packung mit je 100 Einheiten: AT 1002



Unistik® 3 *Extra*

PZN 3802444

ø 21 G (0,81 mm), Eindringtiefe 2,0 mm
Durchschnittliches Blutvolumen 75 µl – 125 µl

Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:
Besonders geeignet für die Kapillarblutgewinnung bei Patienten mit
z.B. Hornhaut- oder Hautverdickungen sowie alle Untersuchungen,
die eine höhere Blutmenge erfordern.

Packung mit je 100 Einheiten: AT 1012



Unistik® 3 *Neonatal & Laboratory*

PZN 3802438

ø 18 G (1,2 mm), Eindringtiefe 1,8 mm
Durchschnittliches Blutvolumen ≥ 200 µl

Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:
Speziell zur Kapillar-/Fersenblutgewinnung bei Früh-
und Neugeborenen. Besonders auch zur Durchführung
von Blutgasanalysen etc. geeignet. Die Lanzettenspitze
dieser Version ist im Gegensatz zu den anderen Versionen
klingenförmig geschliffen.

Packung mit je 100 Einheiten: AT 1052



Gern informieren wir Sie durch
unseren Kundenservice unter
06026 9775-0 oder auf unserer
Website **www.unistik3.com**



Schmerzreduziert für Patienten und damit
stressfreier für die Anwender, einfach und
sicher in der Bedienung – uns vorliegende
Untersuchungen und Schreiben zeigen die
große Zufriedenheit und belegen, dass es
93% der befragten Mitarbeiter von Kliniken,
Laboren und freien Praxen vorziehen würden,
Unistik 3 auch in der Zukunft einzusetzen!



Owen Mumford GmbH
Alte Häge 1
63762 Großostheim-Ringheim, Germany
T: 06026/97750 F: 06026/977529
E: info@owen-mumford.de

www.owenmumford.com

Ihr Fachhändler empfiehlt sich:

Sicherheitslanzette für Klinik, Praxis,
Labor und Diabetiker –
mit dem Patent gegen Schmerz!



Unistik® 3

Technische Änderungen vorbehalten. GER/US/PEL/01 09/01



 OWEN MUMFORD

Mit Sicherheit sicher



In Deutschland kommt es jedes Jahr zu schätzungsweise 500.000 Nadelstichverletzungen – mit dem hohen Risiko der Übertragung von lebensbedrohlichen Infektionen wie Hepatitis B, Hepatitis C und HIV.

Deshalb schreibt auch die Biostoffverordnung in Verbindung mit den TRBA 250 (Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege) den besseren Schutz vor Nadelstichverletzungen vor.

Unistik 3 erfüllt alle Anforderungen für den sicheren Einsatz von Lanzetten. Die vorgespannte Unistik 3-Nadel ist nicht nur vor dem Gebrauch verborgen, sondern wird auch nach dem Einsatz sofort automatisch in ihr Gehäuse zurückgezogen. So werden unnötige Verletzungen durch Nadelstiche vermieden. Zusätzlich verhindert der Verriegelungsmechanismus einen Mehrfachgebrauch.

Das Einmal-Produkt Unistik 3 trägt als Teil konsequenter Präventionsstrategien auch deutlich zur Bekämpfung von übertragbaren Keimen wie MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) bei.

Unistik® 3

Einfach zu bedienen – drehen, abziehen, testen und entsorgen...

Die vorgespannten Sicherheitslanzetten Unistik 3 sind besonders einfach und sicher zu bedienen.



Halten Sie Unistik 3 an beiden Seiten und drehen Sie die Schutzkappe einfach ab.

**ERST ZWEIMAL DREHEN
UND DANN ABZIEHEN!**

Drücken Sie die Lanzetten-Vorderseite gegen die gewählte Blutentnahmestelle und lösen Sie den Einstich durch Druck auf den seitlichen Auslöseknopf aus.

Geben Sie den Blutstropfen auf den Teststreifen und entsorgen Sie die Lanzette in einen dafür vorgesehenen Behälter.

Geeignete Entnahmestellen finden sich in den Fingerkuppen und an den Fersen.

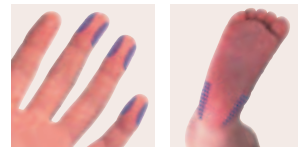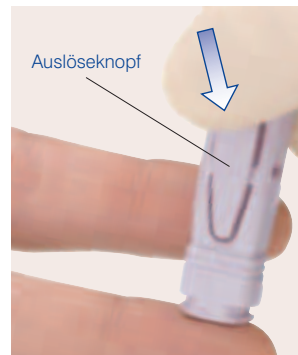

Patientenfreundlich durch das Patent gegen den Schmerz!

Unistik 3 ist aber nicht nur leicht zu bedienen und sicher in der Anwendung. Auch an die Patienten wurde gedacht: Die patentierte Comfort Zone Technology von



Owen Mumford reduziert deutlich die Schmerzwahrnehmung bei Kapillarblutentnahme. Wenn die Lanzette auf die Haut gepresst wird, stimulieren 8 punktförmige Erhebungen die Nervenenden. Diese senden ein Signal an das Gehirn und unterdrücken so den

eigentlichen Schmerz des Einstichs. Zusätzlich sorgt der seitlich angebrachte Auslöseknopf für eine stabile und schmerzarme Blutentnahme – für Patienten, insbesondere Diabetiker ist dies natürlich viel angenehmer* als herkömmliche Sicherheitslanzetten.

Für die Entwicklung dieser Technologie wurde Owen Mumford mit dem renommierten Queen's Award for Innovation ausgezeichnet!



*Gemäß Studie, Simbec Forschung, 2007

